


# HAEMOLANCE®

La lanceta de seguridad que se retrae

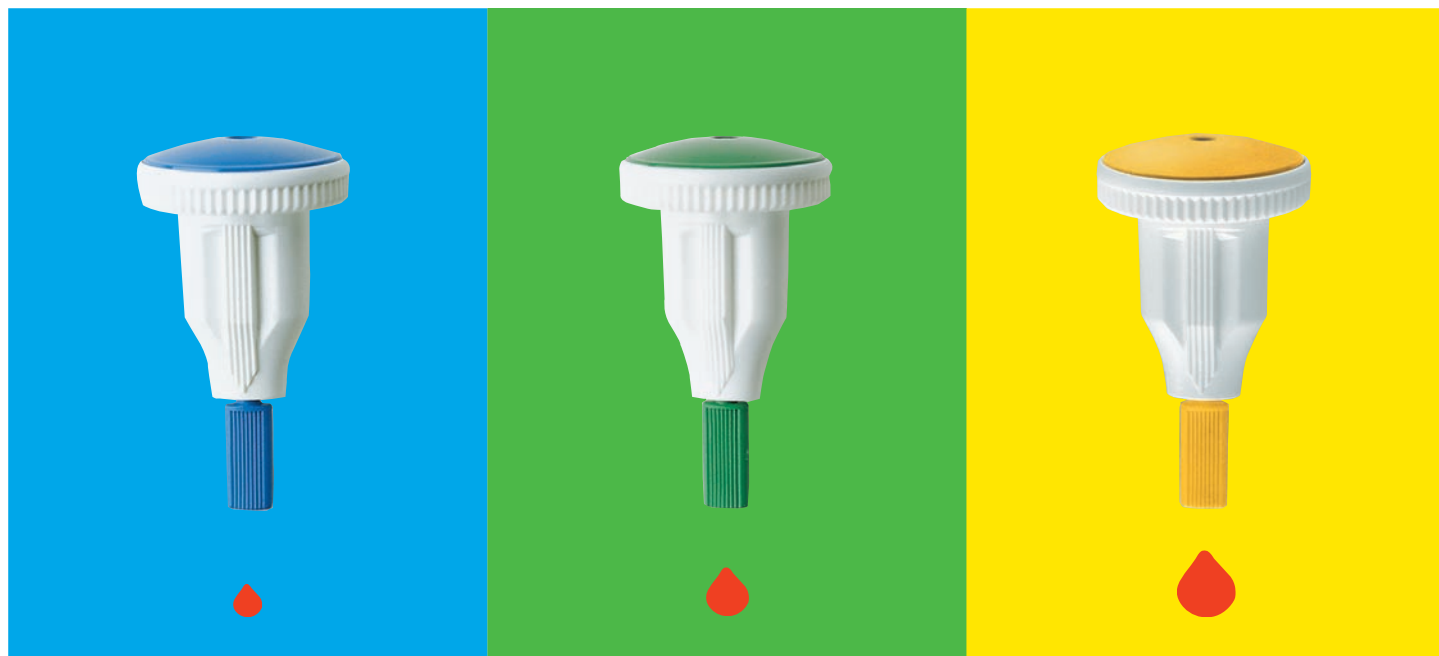

## Ahora con tres diferentes tamaños de muestra

Con HAEMOLANCE Usted puede sentirse seguro. La aguja queda escondida dentro de la lanceta y se retrae una vez usada. La aguja nunca es visible. Esto es importante para aquellas personas que temen las agujas.

La lanceta HAEMOLANCE presenta tres diferentes tamaños de muestra de sangre: Pequeña (azul), Normal (verde) y Grande (amarillo). Elija el color que proporciona la cantidad de sangre requerida.

HAEMOLANCE llega lista para usar, no necesita ninguna manipulación previa. Tan solo girar el tapón protector y pinchar. No se puede ser más seguro, rápido y simple en la toma de la muestra de sangre.





Pequeña




Normal



Grande

## Simple y seguro, tanto para el paciente como para enfermería

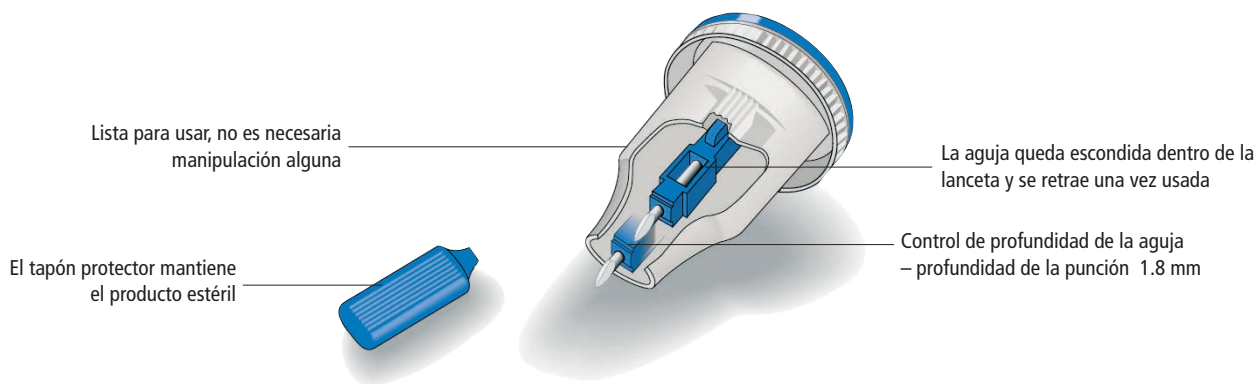

### Características y beneficios únicos


- La aguja se retrae automáticamente dentro de la lanceta después de ser usada, protegiendo a los pacientes y al personal de enfermería contra los pinchazos accidentales e infecciones cruzadas.
- La aguja nunca es visible lo que reduce la aprehensión de los pacientes a la toma de muestras.
- HAEMOLANCE ahorra tiempo: es rápida y simple de usar y precisa pocas instrucciones de manejo.
- La forma ergonómica y la superficie rugosa facilita coger la lanceta.
- El control de profundidad de la aguja proporciona siempre unos resultados uniformes y exactos.
- HAEMOLANCE se presenta en tres modelos: (pequeña, normal, grande) para obtener la cantidad de sangre específica para cada test.
- HAEMOLANCE es un producto de un solo uso, estéril.

### Presentación

Se suministra en dispensador plástico con instrucciones de uso.

Código Pequeña	Código Normal	Código Grande	Unidades/caja	Cantidad mínima envío
50125-1	50115-1	50135-1	150	30 cajas
50127-1	50107-1	50137-1	50	80 cajas

### Cómo utilizar la lanceta HAEMOLANCE

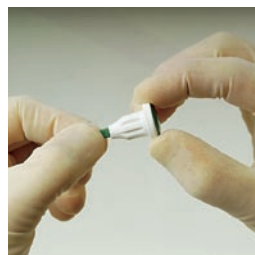

1. Retire el tapón protector, gire y estire en un solo movimiento (vuelta completa).



2. Colocar la lanceta próxima a la uña (aprox. 2 mm de separación). Presionar y dejar el botón en un movimiento rápido. Deséchela en un contenedor de agujas una vez usada.

### IMPORTANTE!

- Piense que es Usted, el usuario, quien activa y controla la lanceta con su dedo pulgar. Presione y deje el botón en un solo movimiento rápido.
- La lanceta debe quedar posicionada sobre el dedo del donante de forma suave pero al mismo tiempo firme. En aquellas personas con piel gruesa, la lanceta puede ser presionada con mayor fuerza contra el dedo.
- El punto de punción se muestra a través de las marcas sobre la lanceta. La profundidad de la punción es de 1.8 mm en todos los modelos. Elija la lanceta azul, verde o amarilla, en función de cuanta muestra de sangre necesita
- HAEMOLANCE también se puede usar para puncionar el lóbulo de la oreja.

